

Lees voor elk gebruik de hele bijsluiter van Multi-Gyn FloraPlus zorgvuldig door en bewaar deze goed.

Distributeur voor Nederland:

SalesMark, Europark 20,
4904 SX, Oosterhout (NB) Email: info@salesmark.net

Producent:

BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nederland

Inhoud

- A. Multi-Gyn FloraPlus – Behandelt en voorkomt vaginale schimmel problemen
- B. Hoe werkt Multi-Gyn FloraPlus
- C. Indicaties
- D. Wijze van gebruik
- E. Samenstelling van Multi-Gyn FloraPlus
- F. Bijwerkingen
- G. Interacties met medicijnen
- H. Zwangerschap en borstvoeding
- I. Hoe bewaart u Multi-Gyn FloraPlus?
- J. Toepassing

A. Multi-Gyn FloraPlus- Behandelt en voorkomt vaginale schimmel problemen

- + **Prebiotische stimulatie van melkzuurbacteriën (Lactobacillen)**
- + **Werkst verlicht bij jeuk en branderigheid en normaliseert de afscheiding**
- + **Voorkomt (terugkerende) Candida**
- + **Prebiotisch effect stimuleert een gezonde vaginale flora**
- + **Remt de groei van schadelijke micro-organismen zonder dat hierbij resistentie optreedt**
- + **Zorgt voor een juiste vaginale zuurgraad (pH-waarde)**
- + **Bioactief, veilig en natuurlijk**

B. Hoe werkt Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus is een natuurlijk product en is gebaseerd op het gepatenteerde bioactieve 2QR-complex in combinatie met prebiotische bestanddelen. Deze prebiotica zijn voedingsstoffen in FloraPlus die de groei van de nuttige melkzuurbacteriën stimuleren. De prebiotica in FloraPlus bestaan uit een uniek mengsel van vitaminen, aminozuren en monosacchariden. Multi-Gyn FloraPlus verbetert de vaginale flora en pH. Het 2QR-complex is een natuurlijke stof die wordt gewonnen uit geneeskrachtige planten en bestaat uit bioactieve polysacchariden. Het heeft als unieke eigenschap dat het de hechting van schadelijke bacteriën tegengaat en deze zo op een effectieve en natuurlijke wijze neutraliseert. Dit natuurlijke blokkerende en prebiotische effect is volkomen veilig en onschadelijk, doordat het niet is gebaseerd op giftige stoffen of agressieve chemicaliën. Het heeft dan ook geen enkele schadelijke bijwerking. Er ontstaat geen resistentie. Deze unieke combinatie maakt Multi-Gyn FloraPlus het ideale product voor een gezonde vagina.

Multi-Gyn FloraPlus houdt het milieu in uw vagina in balans door de schadelijke bacteriën te onderdrukken en de ontwikkeling van nuttige melkzuurbacteriën (Lactobacillen) te stimuleren. Op deze wijze creëert Multi-Gyn FloraPlus een natuurlijke en gezonde flora. Dit voorkomt ongemakken die door overmatige groei van ongewenste micro-organismen zoals Candida worden veroorzaakt.

Op deze wijze biedt FloraPlus zeer effectieve preventie van (terugkerende) vaginale schimmel problemen. Het verlicht ongemakken zoals afscheiding, jeuk, branderigheid, roodheid en zwelling.

Multi-Gyn FloraPlus is geregistreerd als een Medisch Hulpmiddel klasse IIa.

C. Indicaties:

Met FloraPlus beschermt u uzelf tegen vaginale problemen:

- na uw menstruatieperiode en na (onbeschermde) geslachtsgemeenschap
- tijdens of na het gebruik van geneesmiddelen zoals antibiotica
- als u vaak zwemt en tijdens de vakantie
- wanneer u last heeft van ongemakken zoals jeuk, branderigheid en abnormale afscheiding
- wanneer u gevoelig bent voor vaginale schimmelinfecties is FloraPlus ideaal, doordat het zeer effectief de groei van Candida (schimmel) voorkomt en vermindert.
- ... en op alle andere momenten dat uw vagina wel een klein beetje hulp kan gebruiken.

D. Wijze van gebruik

Voor de behandeling van vaginale schimmel problemen:

Gebruik 1 tube voor eenmalig gebruik gedurende 5 achtereenvolgende dagen vóór het slapen gaan.

Ter voorkoming van (terugkerende) vaginale schimmel problemen:

Om de gunstige melkzuurbacteriën te ondersteunen en u tegen vaginale problemen te beschermen is het voldoende FloraPlus eens per 3 dagen te gebruiken.

Ondersteuning gedurende antibiotica gebruik:

Gebruik 1 tube per dag voor het slapen gaan gedurende 5 achtereenvolgende dagen.

Let op! Multi-Gyn FloraPlus is geen antischimmel medicijn. Bij aanhoudende of terugkerende klachten dient u altijd contact op te nemen met uw arts.

Multi-Gyn FloraPlus binnen één behandelingsperiode niet langer dan 30 dagen achter elkaar gebruiken.

E. Samenstelling van Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus is een natuurlijk product en is gebaseerd op het gepatenteerde bioactieve 2QR-complex in combinatie met prebiotische bestanddelen zoals aminozuren en vitaminen. De unieke formule bevat geen hormonen en geen bestanddelen van dierlijke herkomst. Het bevat geen agressieve chemicaliën of geurstoffen en is volkomen veilig en onschadelijk. Actieve ingrediënten (bestanddelen): Galactoorabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, monosaccharides, aminozuren, vitaminen

* 2QR: gepatenteerde bioactieve polysacchariden

Allergieën voor de bestanddelen van Multi-Gyn FloraPlus komen zeer zelden voor. Wanneer u allergisch bent voor plantaardige stoffen, adviseren wij u om een kleine hoeveelheid Multi-Gyn FloraPlus op de binnenzijde van uw onderarm uit te proberen. Indien een jeukende rode plek verschijnt, bent u waarschijnlijk allergisch voor één van de bestanddelen van Multi-Gyn FloraPlus. In dit geval adviseren wij u Multi-Gyn FloraPlus niet te gebruiken.

F. Bijwerkingen.

Aangezien Multi-Gyn FloraPlus een optimale zuurgraad heeft en sperma basisch is, kan het gebruik van Multi-Gyn FloraPlus de activiteit van sperma verminderen. Indien u zwanger wilt worden, dient u Multi-Gyn FloraPlus tijdens de uren direct na de geslachtsgemeenschap dan ook niet te gebruiken. Multi-Gyn FloraPlus kan niet als anticonceptie worden gebruikt. Er zijn geen andere bijwerkingen bekend.

G. Interacties met medicijnen

Multi-Gyn FloraPlus kan probleemloos naast medicijnen worden gebruikt.

H. Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van Multi-Gyn FloraPlus tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding.

I. Hoe bewaart u Multi-Gyn FloraPlus?


Het wordt afgeraden Multi-Gyn FloraPlus te bewaren bij een temperatuur lager dan 10°C of hoger dan 25°C. Bij voorkeur bij kamertemperatuur bewaren.

J. Toepassing


Multi-Gyn FloraPlus is een prebiotische vaginale gel. Elke tube bevat precies de juiste hoeveelheid voor 1 toepassing. De prebiotische vaginale gel wordt met een speciaal daarvoor gevormde canule direct in de vagina ingebracht. De tube na gebruik weggooien.

Op de tekeningen hieronder kunt u zien hoe u de tube voor eenmalig gebruik dient te gebruiken.


Let op: De tube is zodanig vormgegeven dat de aanbevolen hoeveelheid gel wordt ingebracht. Wanneer u de tube volgens de aanwijzingen gebruikt, zal een kleine hoeveelheid gel in de tube achterblijven.

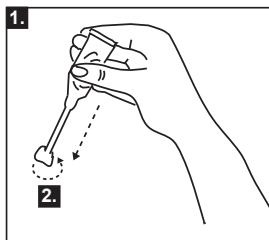


1. Voor gebruik de tube goed schudden.
2. Breek met een draaiende beweging het dopje van de tube af.

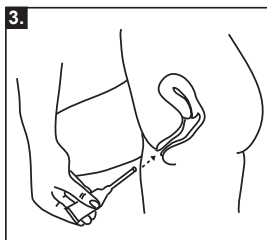

3. Neem de tube in uw hand en breng voorzichtig het dunne uiteinde van de canule (van de tube) de vagina in.

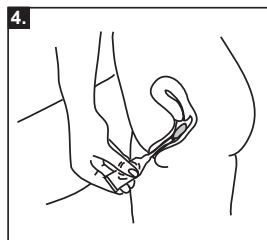

4. Knijp voorzichtig in het dikke uiteinde van de tube om de gel in de vagina in te brengen.

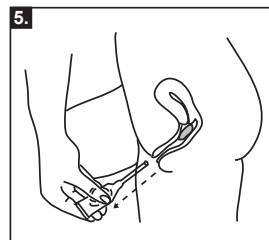

5. Verwijder al knijpend de tube en gooi deze weg.



11-2010
SM1801.1